




TARDIGRAD


A service no one else can deliver




NÁVOD K POUŽITÍ

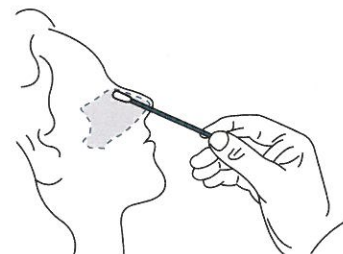


KROK 1
Odeberte vzorek pomocí
výtěrové tyčinky.

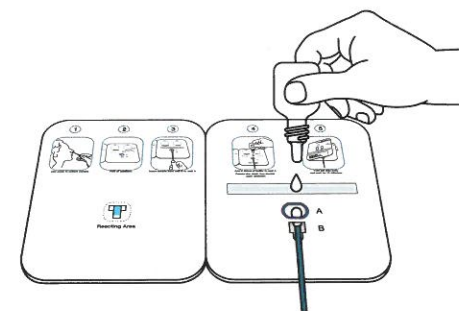

KROK 2
Prostrčte výtěrovou tyčinku
se vzorkem jamkou B do jamky A
a přidejte 6 kapek pufru do jamky A.

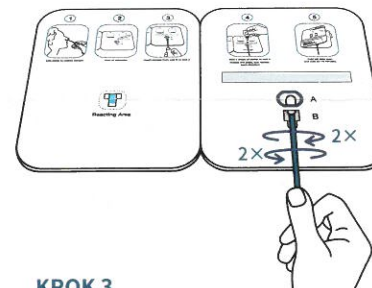

KROK 3
Tyčinkou dvakrát otočte ve směru
a proti směru hodinových ručiček.

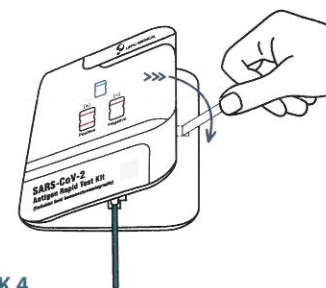

KROK 4
Odstraňte ochranný kryt fixačního
lepidla. Spleťte levou a pravou stranu
k sobě a vyčkejte 15 minut.



INTERPRETACE VÝSLEDKU


POZITIVNÍ
(+)



NEGATIVNÍ
(-)



NEPLATNÝ

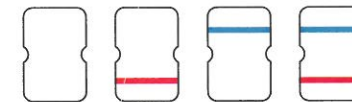

Tardigrad International Consulting, s.r.o.
Aviatická 1092/8, 161 00 Praha 6, Czech Republic
e-mail: prague@tardigrad.net
www.tardigrad.net



Instuktační
video na
youtube






TARDIGRAD
A service no one else can deliver




NÁVOD K POUŽITÍ

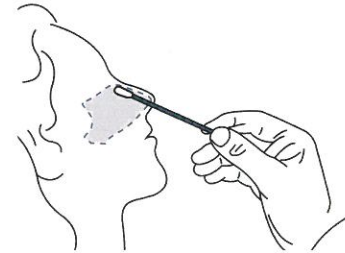


KROK 1

Odeberte vzorek pomocí výtěrové tyčinky.

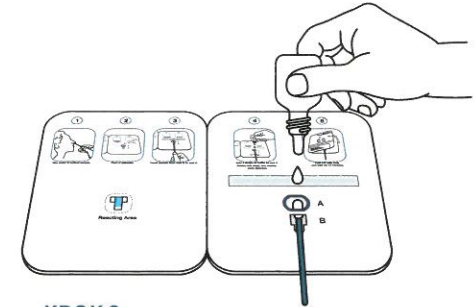


KROK 2

Prostrčte výtěrovou tyčinku se vzorkem jamkou B do jamky A a přidejte 6 kapek pufru do jamky A.

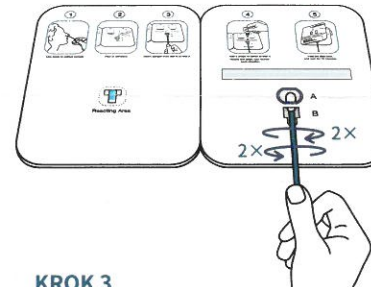

KROK 3

Tyčinkou dvakrát otočte ve směru a proti směru hodinových ručiček.

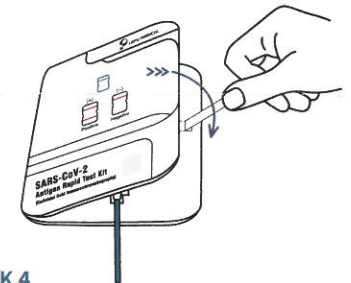


KROK 4

Odstraňte ochranný kryt fixačního lepidla. Spleťte levou a pravou stranu k sobě a vyčkejte 15 minut.



INTERPRETACE VÝSLEDKU


POZITIVNÍ
(+)

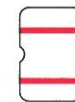

NEGATIVNÍ
(-)



NEPLATNÝ

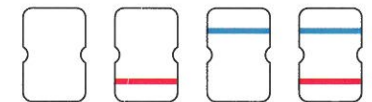

Tardigrad International Consulting, s.r.o.
Aviatická 1092/8, 161 00 Praha 6, Czech Republic
e-mail: prague@tardigrad.net
www.tardigrad.net


 Instuktažní
video na
youtube






TARDIGRAD
A service no one else can deliver


NÁVOD K POUŽITÍ

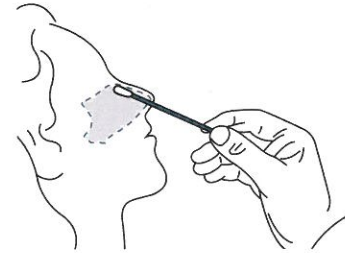


KROK 1
Odeberte vzorek pomocí
výtěrové tyčinky.

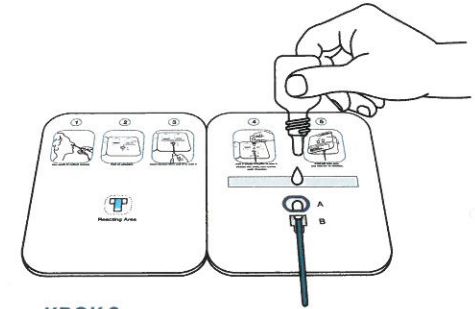

KROK 2
Prostrčte výtěrovou tyčinku
se vzorkem jamkou B do jamky A
a přidejte 6 kapek pufru do jamky A.

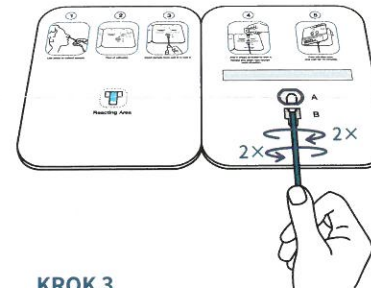

KROK 3
Tyčinkou dvakrát otočte ve směru
a proti směru hodinových ručiček.

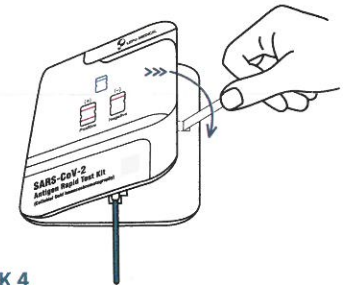

KROK 4
Odstraňte ochranný kryt fixačního
lepidla. Spleťte levou a pravou stranu
k sobě a vyčkejte 15 minut.




INTERPRETACE VÝSLEDKU


POZITIVNÍ
(+)



NEGATIVNÍ
(-)

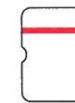

NEPLATNÝ

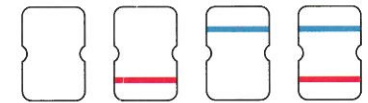

Tardigrad International Consulting, s.r.o.
Aviatická 1092/8, 161 00 Praha 6, Czech Republic
e-mail: prague@tardigrad.net
www.tardigrad.net


 Instuktažní
video na
youtube






TARDIGRAD
A service no one else can deliver


NÁVOD K POUŽITÍ

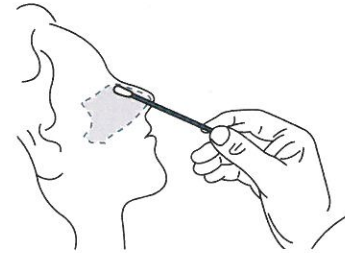


KROK 1
Odeberte vzorek pomocí
výtěrové tyčinky.

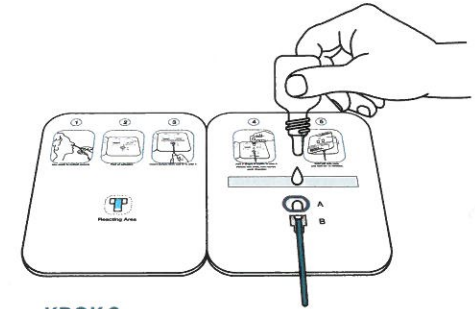

KROK 2
Prostrčte výtěrovou tyčinku
se vzorkem jamkou B do jamky A
a přidejte 6 kapek pufru do jamky A.

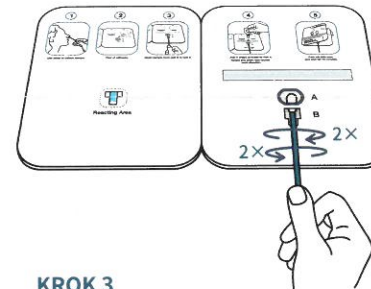

KROK 3
Tyčinkou dvakrát otočte ve směru
a proti směru hodinových ručiček.

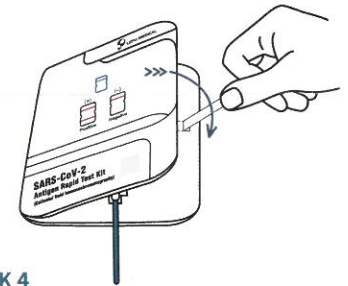

KROK 4
Odstraňte ochranný kryt fixačního
lepidla. Spleťte levou a pravou stranu
k sobě a vyčkejte 15 minut.




INTERPRETACE VÝSLEDKU


POZITIVNÍ
(+)



NEGATIVNÍ
(-)

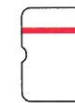

NEPLATNÝ

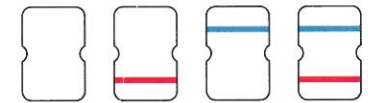

Tardigrad International Consulting, s.r.o.
Aviatická 1092/8, 161 00 Praha 6, Czech Republic
e-mail: prague@tardigrad.net
www.tardigrad.net

 Instuktažní
video na
youtube

